

Mascarilla Higiénica Reutilizable

Testada bajo la Norma de evaluación UNE-EN 14683:2019+AC:2019 (Puntos: 5.2.2 y 5.2.3) dando unos resultados de Eficacia de Filtración Bacteriana BFE 93,84% y Respirabilidad 17,6 Pa/cm² tras 5 ciclos de lavado a 60°C. A medida que se incrementa el número de lavados, no se garantiza la obtención de estos resultados.

Fabricada en España.

Composición de la Mascarilla

Tejido exterior: Primera barrera de protección, tejido resistente (100% poliéster de 240 gr) debido a su alta densidad, así como de fácil lavado y secado.

Tejido intermedio: Segunda barrera de filtro, este tipo de material (viscosa spunlace de 44 gr) asegura una alta absorción de la humedad tanto exterior como interior, proporcionando confort al uso.


Tejido contacto piel: Tercera barrera de protección, este tipo de material (poliéster algodón 144 hilos) garantiza una alta respirabilidad gracias a su composición. No produce irritación al contacto con la piel.

Tallas


Talla adulto/mayor de 12 años: 9,5 x 18 cm (plegada), 17 x 18 cm (extendida).

Talla niño: 6,5 x 16 cm (plegada), 15 x 16 cm (extendida), recomendado para niños de 6 a 9 años.


Se incluye una bolsa con 2 cilindros de silicona para ajustar los elásticos a las orejas si fuera necesario.

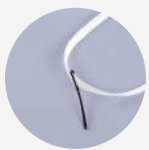


Coloca la brida

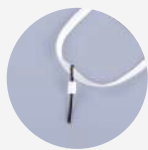

Introduce el cilindro

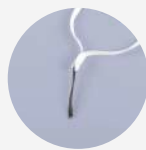

Desliza el cilindro

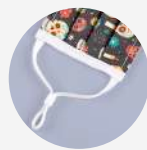

Elimina la brida

Instrucciones de colocación y uso

Lavar las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

Colocar la mascarilla para que cubra boca, nariz y barbilla sujetando el elástico en las orejas.

No tocar la mascarilla mientras se lleve puesta y quitarla sin tocar la parte frontal.

En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.

El uso de mascarilla en niños siempre debe ser bajo la supervisión de un adulto.

Lavar con jabón a mano o a máquina utilizando un programa para ropa delicada.



Lávate las manos



Coloca la mascarilla



Sujétala en las orejas



Quítala sin tocar la parte frontal



Sustitúyela por otra limpia

Advertencia

Nuestras mascarillas están diseñadas para uso particular, no son aptas para uso médico ni para equipos de protección individual (EPI). Esta máscara no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.